

Exablate Neuro

Manual de listas de verificación del sistema Exablate 4000

Para los sistemas tipo 1.1

Con la versión 7.33 del programa informático ejecutado
en sistemas de RM de GE



ADVERTENCIA:

Este documento constituye un manual de referencia abreviado. No sustituye al Manual del usuario. Siga todas las advertencias y precauciones detalladas en el Manual del usuario de Exablate 4000 tipos 1.0 y 1.1 con la versión 7.33 del programa informático.



InSightec, Ltd.
5 Nachum Heth St. PO Box 2059
Tirat Carmel 39120 Israel
www.insightec.com



Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53,
1030 Bruselas, Bélgica

«Precaución: La ley federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o con receta médica»

Copyright ©2023 InSightec Ltd. («INSIGHTEC»), todos los derechos reservados.

Este documento ha sido traducido del documento original en inglés PUB41005213, revisión 2.

El dispositivo **Exablate Modelo 4000 Tipo 1.1** Transcraneal de ultrasonidos focalizados y guiados por IRM («Exablate Neuro», versión 7.33 del programa informático), el programa informático de tratamiento y su documentación correspondiente constituyen propiedad exclusiva y confidencial de INSIGHTEC. Únicamente las personas autorizadas por INSIGHTEC («INSIGHTEC») pueden utilizar la información contenida en este manual. Únicamente aquellas entidades específicamente designadas por derechos transferidos tienen el legítimo derecho a copiar y/o transmitir la información contenida en este manual. Cualquier uso, divulgación, asignación, transferencia o reproducción no autorizados de esta información confidencial constituye un delito que será sancionado con todo el rigor de la ley.

INSIGHTEC no se hará responsable ni asumirá obligación alguna con respecto a cualquier lesión o daño a las personas o a la propiedad que pudieran resultar del uso de este programa informático, si tal uso no se adhiere estrictamente a las instrucciones y precauciones de seguridad dispuestas en los correspondientes manuales de cirugía, los suplementos relacionados y las etiquetas del producto bajo los términos de garantía y venta de este programa informático, ni tampoco por cualquier alteración o cambio que se le hiciera al programa informático sin previa autorización de INSIGHTEC.

Los programas o los protocolos desarrollados o proporcionados por el usuario no serán validados ni estarán garantizados por INSIGHTEC. El uso de cualquier información obtenida mediante dichos programas informáticos o protocolos del usuario queda bajo la responsabilidad exclusiva del usuario.

Los usuarios deberán tener plena conciencia del riesgo de transmisión de virus informáticos que pudieran surgir con el intercambio de archivos electrónicos o CD.

Las marcas comerciales de terceros se considerarán propiedad exclusiva de las correspondientes entidades.

Las especificaciones están sujetas a enmiendas sin notificación previa, en conformidad con las regulaciones y la legislación aplicables.

Una o más partes del producto pueden incorporar o distribuirse con programas informáticos de código abierto. Consulte el botón Copyright Notice (Aviso sobre derechos de autor) en la pantalla Utilities (Utilidades).

Este documento es propiedad de INSIGHTEC Ltd. y contiene información exclusiva y confidencial de INSIGHTEC Ltd. Antes de recibir este documento, se ha firmado un acuerdo de confidencialidad entre el destinatario e INSIGHTEC Ltd. Este documento se ha prestado con la condición expresa de que no se transferirá ni se divulgará la información contenida en el mismo a terceros sin el consentimiento expreso de INSIGHTEC, Ltd. Además, el documento se devolverá a INSIGHTEC, Ltd. cuando se solicite sin realizar ninguna copia del mismo.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con INSIGHTEC llamando al número de teléfono +1-866-674-3874 (número de EE. UU.).

Sitio web de INSIGHTEC: <http://www.insightec.com>

INFORMACIÓN SOBRE LA REVISIÓN

Esta es la **revisión 2** del manual para Exablate 4000 tipo 1.1 con la versión 7.33 del programa informático, aplicable a sistemas de RM GE. Póngase en contacto con el soporte de marketing de Insightec para determinar si se trata de la versión más reciente.

Todos los capítulos de este manual cuentan con el estado de revisión del capítulo en la parte inferior. Indica la fecha y el estado de versión de cada uno de los capítulos. Tenga en cuenta que, cuando se actualiza el manual, no necesariamente se actualizan todos los capítulos, por lo que algunos pueden tener un estado de revisión anterior al estado de revisión del manual.

La portada y esta página son todas de la **Revisión 2.0** con los capítulos correspondientes del manual:

<i>N.º del capítulo</i>	<i>Nombre del capítulo</i>	<i>Fecha de rev. del capítulo</i>	<i>N.º de páginas en el capítulo</i>
Capítulo 1	Lista de verificación de la puesta en marcha del sistema	2.0, 04/22	3
Capítulo 2	Preparación y lista de verificación del DQA	2.0, 04/22	3
Capítulo 3	Lista de verificación del tratamiento	2.0, 04/22	4
Capítulo 4	Lista de verificación del procedimiento de limpieza	2.0, 05/23	3
Capítulo 5	Lista de verificación de la calibración TG	1.0, 07/21	2

*** - Incluidas las contraportadas en blanco**

Lista de verificación de la puesta en marcha del sistema



NOTA:

El circuito de agua alcanzará sus condiciones óptimas de funcionamiento en el plazo de 30 minutos. Tenga esto en cuenta y ponga en marcha el dispositivo lo antes posible antes del tratamiento para evitar retrasos cuando llegue el paciente.



NOTA:

Existen múltiples flujos para la puesta en marcha del sistema; consulte los diagramas de flujo en la parte inferior de esta lista de verificación y seleccione la opción más adecuada para su flujo de trabajo y sus preferencias.

Si enciende el sistema antes de conectar los cables del equipo del casco a la unidad frontal, pulse el botón Stop Sonication (Detener sonicación) del usuario para reiniciar las conexiones.

- Confirme que se ha reiniciado la consola de RM al comienzo del día. Si no se ha hecho, reiniciela.



Conexión de los cables del equipo del casco a la unidad frontal

- Desbloquee las ruedas del carro de almacenamiento y transferencia (CAT) y colóquelo cerca de la unidad frontal (UF).
- Conecte el cable de agua y los dos cables de acoplamiento rápido, especialmente etiquetados, a la unidad frontal.



PRECAUCIÓN:

Verifique que cada conector de acoplamiento rápido esté conectado en la posición correcta, debidamente etiquetada. Los conectores se deben alinear cuidadosamente en su sitio antes de bloquearlos.

Confirme que el cable de agua esté completamente acoplado, lo que indicará mediante un chasquido.



Encendido del sistema

- Encienda el sistema pulsando el interruptor principal de Encendido verde de la consola. Aparecerá el aviso **Begin Logon** (Inicio de sesión).
- Extraiga todos los discos duros externos y/o CD del ordenador de la consola.
- Presione Ctrl + Alt + Supr para acceder al cuadro de diálogo de información de inicio de sesión.
- Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña que le proporcionó Insightec. Pulse OK (Aceptar) para continuar.
- (Nota: los parámetros de inicio de sesión de Windows® distinguen entre mayúsculas y minúsculas).
- Seleccione **Brain Mid-Frequency** (Frecuencia media del cerebro) en la pantalla de selección de la aplicación.
- Aparecerá la ventana emergente de exención de responsabilidad del Exablate; pulse OK (Aceptar) para continuar.



Preparación del circuito de agua

- Descargue el depósito de agua de su compartimento en la unidad frontal y desconéctelo mediante el cable de liberación rápida.

- Llene el depósito hasta la marca, conéctelo y vuelva a colocarlo en su compartimento correspondiente. Use agua potable de ósmosis inversa para el DQA y la limpieza, y agua de grado médico de tipo 2 para los tratamientos.*
- En el menú Utilities (Utilidades) de la estación de trabajo () o en la pantalla táctil de control del circuito de agua, establezca el circuito de agua en modo Preparation (Preparación).*
- Comenzará la desgasificación. El estado del circuito de agua y los niveles de oxígeno disuelto (DO) (en PPM) se indican en la barra de estado en la parte inferior de la pantalla de la estación de trabajo y en la pantalla de la unidad frontal (UF).*

**NOTA:**

Puede continuar con la puesta en marcha del sistema mientras se prepara el agua. La desgasificación continuará (a menos que se detenga manualmente) hasta que el usuario llene el transductor.

Preparación de la camilla de RM

- Saque por completo la sobrecamilla de RM del túnel de RM.*
- Retire cualquier bobina o placa base de RM que estén conectadas a la mesa de RM en ese momento.*
- Coloque la placa base de RM Exablate en la camilla de RM y confirme que esté completamente acoplada.*

Colocación del equipo del casco en la camilla de RM

- Desbloquee las ruedas del CAT y deslícelo hacia la camilla de RM mientras va soltando los cables.*
- Coloque el CAT perpendicularmente a la camilla de RM, de modo que las marcas queden alineadas.*
- Libere y baje el puente de acoplamiento. Confirme que haya una conexión completa entre el puente de acoplamiento y la camilla de RM.*
- Bloquee las ruedas del CAT.*

**PRECAUCIÓN:**

Para no dañar los componentes del sistema, confirme que nada obstruya la trayectoria entre el equipo del casco y su posición designada en la placa base del adaptador de la unidad de RM.

- Coloque una mano en el mango auxiliar y la otra en el mango principal. Mientras pulsa el «botón de liberación del transductor», lenta y firmemente deslice el equipo del casco hasta colocarlo en posición. Un "click" denota el acoplamiento completo. .*
- Baje el cierre principal para asegurar el equipo del casco en su posición.*
- Conecte el conector de la bobina cefálica y de seguimiento a la camilla de RM.*
- Conecte el cable del botón de detención de la sonicación del paciente al enchufe de la camilla de RM.*
- Coloque y/o alinee las etiquetas de referencia.*
- Cierre el puente del CAT, desbloquee las ruedas del CAT y aléjelo de la camilla de RM. No será necesario hasta después del tratamiento.*

Verificación de que el dispositivo está listo para el tratamiento

- Confirme que los estados del dispositivo y de la unidad de RM muestren «Ready» (Listo) en la pantalla de la estación de trabajo, y que el indicador verde de encendido del sistema en la consola del usuario esté iluminado.*

Con la versión de software DV26 y posteriores de GE, es posible que tenga que pulsar el botón «External Host» (Host externo) en la ET de RM y seleccionar «ExAblate» en el menú desplegable para activar las comunicaciones.




ADVERTENCIA:

Revise visualmente el sistema Exablate para:

- Comprobar la integridad del transductor, la unidad frontal y la mesa de RM.
- Confirmar que los conectores están debidamente asegurados.
- Confirmar que la placa base de RM Exablate y el equipo del casco están debidamente acoplados.

De no seguir estas instrucciones, el dispositivo podría funcionar indebidamente.

 **Diagramas de opciones del flujo de puesta en marcha del sistema**

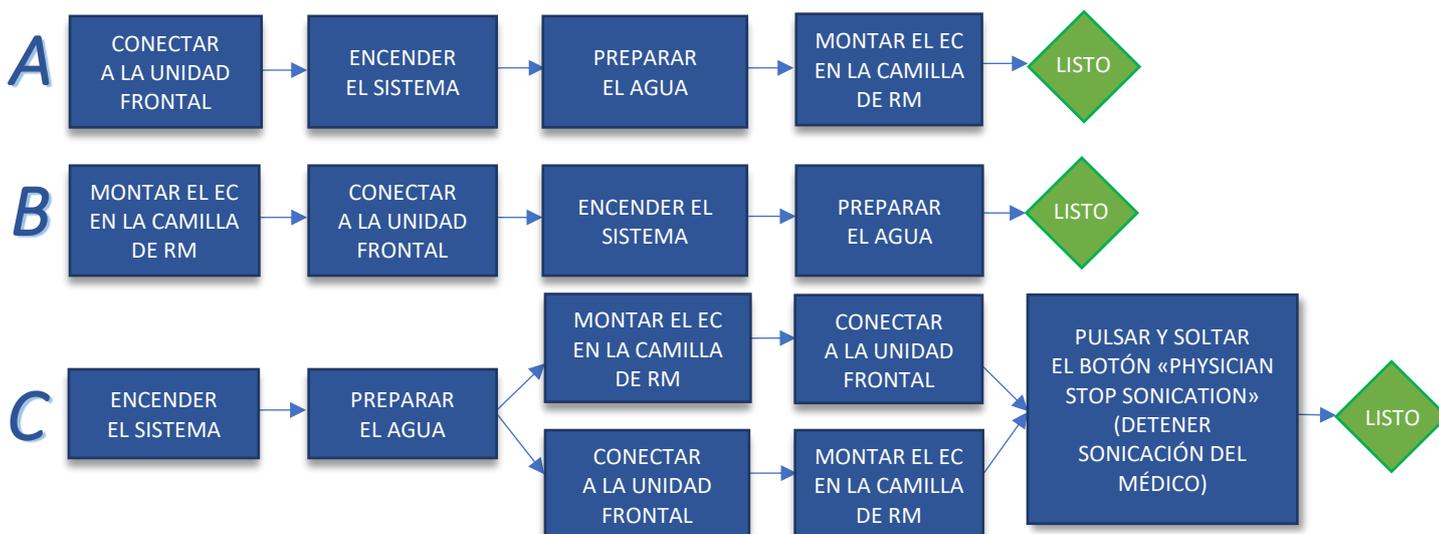

Lista de verificación de la preparación



Puesta en marcha del sistema para el DQA

- Realice una de las opciones de flujo para poner en marcha el sistema tal y como se define en la **Lista de verificación de la puesta en marcha del sistema**
- Confirme que el transductor está situado en **Posición inicial** de acuerdo con la etiqueta en el posicionador.
- Fije la membrana del paciente destinada al tratamiento en el **montaje del soporte del DQA**.
- Coloque un **fantoma del DQA** en el **montaje del soporte del DQA**, y fíjelo al equipo del casco y al transductor.
 - Conecte la **bobina cefálica** en el conector específico (si corresponde).
- Asegúrese de que la **válvula de escape de aire** del transductor esté **abierta**. **Llene el transductor** con agua hasta que quede ligeramente convexo
- Cierre la válvula de escape de aire**. Libere el exceso de aire de las tuberías con el botón rojo **Excess Air Release** (Liberar exceso de aire).
- Realice un llenado obligatorio corto para reemplazar el agua perdida. Asegúrese de que no haya fugas. Inicie la **circulación** del agua

✓ Procedimiento del DQA

- En la **consola de la unidad de RM**: abra un examen nuevo
- En la **sala de RM**: defina el punto de referencia y acerque la **sobrecamilla** a la posición de exploración.
- Inicie un **nuevo tratamiento**  en el menú principal del programa informático de la aplicación de Exablate.
- En la **consola de la unidad de RM**: prescriba y ejecute una exploración 3-Plane Localizer (Localizador en 3 planos).
- En la **consola de la unidad de RM**: prescriba y ejecute 3 orientaciones de imágenes de planificación del DQA (sagital, axial y coronal).
- Ejecute la **exploración de seguimiento automático del transductor** .
 - En RM de 3 T: **omite** la calibración TG (seleccione «Cancel» [Cancelar]).
 - Realice una exploración de la frecuencia central de RM (opcional) .
- Abra el **cuadro de diálogo Image Retrieval** (Recuperación de imágenes) , y **seleccione y cargue** las tres **series de planificación del DQA**.
- Asegúrese de que el punto focal del transductor esté situado en el **centro** del fantoma del DQA.
 - Si es necesario: reposicione el transductor y vuelva a ejecutar una **exploración de seguimiento del transductor** .
- Establezca el **protocolo de tratamiento**  en **Brain-DQA** (DQA de cerebro).
- Pulse el botón **Stop Sonication** (Detener sonicación) y pase a la **etapa de tratamiento** .
- Establezca el nivel de tratamiento en **Treat High** (Tratamiento alto) .

NOTA: En el procedimiento de DQA, NO hay necesidad de utilizar imágenes de TC ni de ejecutar exploraciones de detección de movimiento.
- Sonique**  el conjunto predefinido de **5 dianas** con los parámetros indicados en la siguiente tabla.

Pulse **Continue** (Continuar) para proceder a la siguiente sonicación .

Utilice el **botón de sonicación siguiente**  para alternar entre las dianas predefinidas.

 Revise los resultados y **ajuste la ubicación de la diana**  si no está bien situada (> 0.5_{mm} de la diana).

 Repita las sonicaciones según sea necesario (después del ajuste, si las imágenes tienen artefactos, aumento térmico incierto, etc.).

Diana n.º	Orientación	Dirección de frecuencia	Potencia	Duración	Objetivo [Temperatura prevista]	Confirmación de la diana
<input type="checkbox"/> 1	Axial	AP	20 _w	13 _{seg}	Alineación geométrica	La diana es claramente visible, alineada en RL
<input type="checkbox"/> 2	Sagital	AP	20 _w	13 _{seg}	Alineación geométrica	La diana es claramente visible, alineada en SI
<input type="checkbox"/> 3	Axial	RL	30 _w	13 _{seg}	Alineación geométrica Aumento de la temperatura	La diana es claramente visible, alineada en AP
<input type="checkbox"/> 4	Axial	RL	30 _w	13 _{seg}	Verificación de la dirección	Enfoque dirigido hacia el lugar adecuado
<input type="checkbox"/> 5	Axial	RL	250 _w	3 _{seg}	Control de cavitación	Confirme Active Power Modulation/cavitation halt (Modulación activa de potencia/detención por cavitación).

Salga del tratamiento y regrese a la pantalla de inicio, drene el agua del transductor. Ajuste al modo **Degassing** (Desgasificación).

Desconecte y seque la membrana del paciente y guarde el montaje del soporte del fantoma del DQA.

Inspeccione la superficie del transductor para comprobar si hay suciedad o grietas visibles.

Manipule los accesorios tal como se describe en la sección **Manipulación de la membrana del paciente y del fantoma para el DQA.**



Preparaciones antes del tratamiento

Asegúrese de que se encuentren disponibles todos los accesorios de INSIGHTEC necesarios; para un procedimiento de tratamiento:

ACCESORIOS PARA PACIENTES Y TRATAMIENTOS INSIGHTEC

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Soporte de montaje del DQA | <input type="checkbox"/> Membrana del paciente | <input type="checkbox"/> Juego de marco estereotáctico craneal |
| <input type="checkbox"/> Kit de tratamiento, que incluye la membrana del paciente, el gel del DQA y los tornillos de fijación | | |

GESTIÓN DEL PACIENTE

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Marcador quirúrgico | <input type="checkbox"/> Cuchilla y herramientas de afeitar | <input type="checkbox"/> Mantas calientes | <input type="checkbox"/> Tapones para los oídos |
| <input type="checkbox"/> Vía i.v. | <input type="checkbox"/> Medias de compresión | <input type="checkbox"/> Tensiómetro/pulsioxímetro | <input type="checkbox"/> Anestesia local para la colocación de los tornillos de fijación |

Asegure la disponibilidad de una **tomografía computarizada** (obligatoria) y una RM de **previa al tratamiento** (opcional).

 Prepare el **plan previo al tratamiento** (con o sin imágenes de **RM previas al tratamiento**).

Realice el **Control diario de la calidad (DQA)** como se describe en este documento.

Asegúrese de que el **circuito de agua** esté en **modo de desgasificación activa** y que el transductor esté colocado lo más **superior** posible.



Preparación del paciente

- Confirme que el **cuero cabelludo** del paciente esté **rasurado** y que se haya **limpiado** con alcohol.
- Asegúrese de que la **vía i.v.** esté colocada.
- Ponga **medias de compresión** al paciente (recomendado).
- Prepare el marco estereotáctico craneal para adaptarlo al tamaño anatómico de la cabeza del paciente mediante los accesorios/kits suministrados.
- Fije el **marco estereotáctico craneal** lo más inferior posible, por encima de las cejas.
- Coloque la **membrana del paciente** en su cabeza, lo más inferior posible, en la orientación correcta:
 - Membrana sin bobina: tornillo/lado de plástico hacia abajo (hacia los pies del paciente)
 - Membrana con bobina: Asegúrese de que los conectores de la bobina cefálica estén en la ubicación correcta según la posición del conector de la bobina junto al transductor.
 - Nota:** En algunos casos puede ser necesario cortar la membrana para adaptarla al paciente.



Colocación del paciente

- Prepare la camilla para el paciente: colchones (funda con mantas), cojines, mantas calientes, etc.
- Asegúrese de que el transductor esté colocado en una posición superior y que esté aproximadamente centrado a lo largo de la dirección A-P.
- Confirme que el transductor está colocado en la **Posición Home (inicial)** (de acuerdo con la etiqueta en el EC).
- Lleve al paciente a la sala de RM. Ayude al paciente a acomodarse en la **camilla**.
- Fije el **marco** a la **placa base** y la **membrana** al **transductor**.
 - Conecte la **bobina cefálica** en el conector específico (si corresponde).
- Cubra al paciente con **mantas calientes**, y póngale **tapones para los oídos** y **gafas polarizadas** (opcional).
 - Sujete** los pies y el cuerpo del paciente con **correas** y use el **soporte para las piernas del paciente** si es necesario.
- Equipe al paciente con el botón **Stop Sonication** (Detener sonicación).
- Mueva el **transductor** a la posición clínica estimada. **Asegure que haya espacio libre entre el paciente y el transductor.**
- Llene el transductor** con agua hasta que quede ligeramente convexo (mediante la pantalla de control de agua o el controlador remoto).
- Cierre la válvula de escape de aire.** Libere el exceso de aire de las tuberías con el botón rojo **Excess Air Release** (Liberar exceso de aire).
- Vierta más agua para reemplazar el agua perdida. Asegúrese de que no haya fugas. Inicie la **circulación** para el **tratamiento**.
- Reduzca al mínimo los pliegues de aire en la membrana** dentro de la zona de paso del transductor.
- Asegúrese de que los cables se muevan libremente y **acerque la sobrecamilla** a la posición de exploración.

El paciente y el sistema Exablate ya están listos para el tratamiento...

Lista de verificación del tratamiento:

etapa de planificación

- En la consola de la unidad de RM: registre al paciente. En la sala de RM: defina el punto de referencia y el isocentro según las etiquetas.
- En la consola de la unidad de RM: prescriba y ejecute una exploración 3-Plane Localizer (Localizador en 3 planos).
- Ejecute la **exploración de seguimiento automático del transductor** .
 - Solamente en sistemas con DV26 de 3 T (o superior): elija **realizar** u **omitir** la calibración TG (consulte la **Lista de verificación de la calibración TG**).
- Realice una **exploración de la frecuencia central de RM** .
- Seleccione un **protocolo de tratamiento apropiado**.
- Cargue el plan previo  si está disponible. De lo contrario, cargue la exploración TC  (la RM preoperatoria es opcional).
- En la consola de la unidad de RM: Planifique la primera serie volumétrica o de orientación en la consola de RM.
 - Seleccione protocolos de exploración en **2D** o **volumétricos**, según las preferencias para la obtención de imágenes.
 - Tenga cuidado de colocar el corte medio a lo largo del plano AC-PC.
 - Hasta 150 cortes axiales, sagitales y coronales (no volumétricos).
- Realice la **exploración de serie preparada**  (Nota: El último paso editado será el que se escanee).
 - Espere a que finalice la adquisición automática de imágenes de **referencia de detección de movimiento**.
- Seleccione un método de adquisición de imágenes y proceda en consecuencia:



Reformat Mode (Modo de reformateo)

- Localice y coloque el AC  y el PC .
- Defina la **línea media** .

(Paralela a la línea media anatómica)
- Active el **Reformat Mode (Modo de aplicación de nuevo formato)** .
- Pulse  para crear volumen.
- Ajuste las orientaciones.
- Pulse  para crear la serie.



Scan by AC-PC (Exploración por AC-PC)

- Localice y coloque el AC  y el PC .
- Defina la **línea media** .

(Paralela a la línea media anatómica)
- Realice la exploración de las orientaciones restantes.





 - El usuario puede determinar la diana a tratar durante las exploraciones.

- Método alternativo: adquiera las imágenes a través de la exploración de la serie preparada  o del **archivo** .

Si no se han adquirido **imágenes de detección de movimiento**, pulse  para adquirirlas.

- Ejecute el **registro automático** .
- Ajuste manualmente  (si es necesario) hasta obtener un registro satisfactorio.
- Determine la diana con las mediciones  →  o con la introducción manual de las **coordenadas AC-PC/RAS**.
- Compruebe la distancia entre el foco del transductor y la diana.
 - Si es necesario, ajuste la ubicación del transductor y vuelva a ejecutar la **exploración de seguimiento del transductor** .
- Si aún no forma parte del plan previo, pulse la **herramienta de marcación automática de senos paranasales y calcificaciones**.
- Revise las imágenes de TC para evaluar las marcas de senos paranasales y calcificaciones.
 - Si es necesario, añada marcas con las herramientas de **NPR poligonales**  y **esféricas**.
 - Utilice la herramienta **Interpolar**  para dibujar automáticamente **polígonos** entre cortes marcados.
- Marque **pliegues de membrana** en la serie de RM axial con las herramientas **NPR poligonales**  e **Interpolar** .
- Confirme que la **temperatura del agua sea inferior a 19 °C** y que el **nivel de PPM sea menor que 2,0** (se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla).
- Enseñe al paciente cómo pulsar el botón **Stop Sonication** (Detener sonicación) y pase a la **etapa de tratamiento** . 

Lista de verificación del tratamiento: etapa del tratamiento

- Verifique que la diana esté **en la ubicación prevista y bloqueada**.
- Pulse **Transducer**  para mostrar el **mapa de los elementos del transductor**.

Pulse **Calculate** y confirme:

- ! # Elements ON (N.º de elementos activados) ≥ 700
- ! Skull Area (Área craneal) $\geq 200 \text{ cm}^2$
- ! Skull Score (Puntuación del cráneo) $\geq 0,4$ (o según el etiquetado regional)

Antes de aplicar la sonicación

- Establezca **Sonication Power, Duration** (Potencia de sonicación, duración) y **Time Extension** (Extensión de tiempo).
- Establezca **Scan Orientation** (Orientación de la exploración), **Frequency Direction** (Dirección de la frecuencia).
- Confirme que la temperatura del agua sea inferior a 19 °C.
- Confirme que el **nivel de PPM sea menor que 2,0**.

Align

Después de cada sonicación

- Verifique la **alineación** de las dianas.
- Compruebe si hay **calentamiento fuera del área de tratamiento**
- Actualice la **temperatura máxima** si es necesario .
- Si la **temperatura de fondo** es incoherente, active la **Background Elimination** (Eliminación de fondo) .

- Realice la sonicación y verifique la ubicación de la diana a lo largo de la dirección de la fase; mantenga la temperatura objetivo de manera que no se lesionen tejidos.
- Verifique la alineación de cada dirección. Consulte la tabla como referencia:

N.º de sonicación	Validación	Orientaciones (direcciones de frecuencia)	Resultado
	RL	Axial (AP) o coronal (SI)	R/L confirmado <input type="checkbox"/>
	AP	Sagital (SI) o axial (RL)	A/P confirmado <input type="checkbox"/>
	SI	Coronal (RL) o sagital (AP)	S/I confirmado <input type="checkbox"/>

-  Si la diana no está alineada, utilice la herramienta **Geo-Adjust** (Ajuste geométrico)  para localizar el centro de la diana.

- ! Continúe al siguiente nivel solo después de que la diana sea claramente visible y esté alineada a lo largo de **TODAS** las orientaciones.

Verify

- Continúe con la etapa de verificación. Ajustes acumulados [mm]:
RL: _____ AP: _____ SI: _____.
- Aumente gradualmente las energías entre un 10 % y un 25 % hasta alcanzar una temperatura de ~50 °C.
- Evalúe al paciente antes de proceder al modo **Treat Low** (Tratamiento bajo).

Treat Low

Treat High

- Aumente gradualmente las energías entre un 10 % y un 25 % hasta que la temperatura comience a hacer efecto y cause lesión permanente.
- Si es necesario, ajuste la ubicación de la diana



Procedimientos después del tratamiento

- Abra la válvula de escape de aire en la parte superior del transductor y drene el agua del transductor.
- Desconecte la bobina cefálica (si procede), libere y manipule la membrana como se define al final de la Lista de verificación del procedimiento de limpieza, mueva el transductor a la posición más superior posible.
- Libere el marco estereotáctico craneal de la placa base, retire al paciente de la camilla y retire el marco estereotáctico craneal.
- Transfiera el equipo del casco al carro. Realice la limpieza tal y como se define en la Lista de verificación del procedimiento de limpieza o como se detalla en el capítulo Limpieza y desinfección del Manual del usuario.
- Después de la limpieza, drene el transductor, deseche el agua drenada y apague el sistema.
- Compruebe la disponibilidad del fantoma del DQA y la membrana del paciente para el próximo tratamiento.

Lista de verificación del procedimiento de limpieza

El procedimiento de limpieza Exablate requiere:

- **Desinfectante para el depósito de agua:** 50 ml de hipoclorito de sodio (CAS 7681-52-9) 4,00 %-4,99 %
- **Toallitas de limpieza y desinfección:** contiene 0,2-0,4 % de cloruro de benzalconio (CAS 8001-54-5)

Procedimiento de limpieza del circuito de agua

- Manipule la membrana del paciente como se define al final de la **lista de verificación del procedimiento de limpieza**.
- Confirme que el transductor esté vacío y que se haya desechado toda el agua utilizada durante el procedimiento.
- Llene el depósito del circuito de agua con ~13 litros de agua potable de ósmosis inversa, como se indica en el depósito.
- Vierta el **desinfectante del depósito de agua** en el depósito y vuelva a conectarlo.
- En la pantalla de inicio del circuito de agua (figura 1A), pulse la opción «Clean» (Limpiar) . El sistema cambiará al modo limpio (figura 1B).
- (**Nota:** Si no se encuentra en la pantalla de inicio, pulse el botón «Home» )

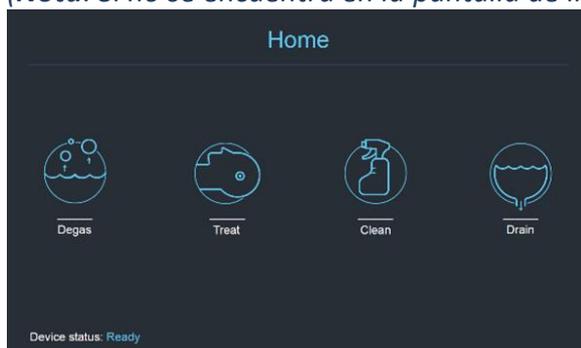


Fig. 1A: menú «Home» (Inicio) en la pantalla táctil del circuito de agua

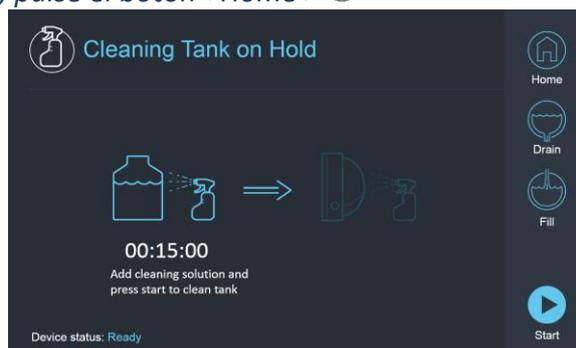


Fig. 1B: menú Clean (Limpiar) del circuito de agua: en espera

- Pulse el botón de inicio  para iniciar la operación de limpieza (figura 2A). Un temporizador de cuenta regresiva en la barra de estado del circuito de agua y en la pantalla del circuito de agua muestra el tiempo de limpieza restante del depósito

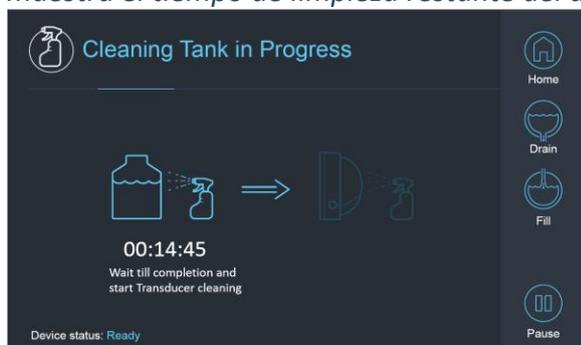


Fig. 2A: pantalla «Tank Cleaning in Progress» (Limpieza del depósito en curso)



Fig. 2B: pantalla Cleaning Tank Completed (Limpieza del depósito completada)

- Monte la membrana del paciente en el montaje del soporte del DQA (sin un fantoma del DQA).
- Conecte el montaje del soporte del DQA al EC y selle el transductor.



- Cuando el temporizador llegue a cero, aparecerá el mensaje *Cleaning Tank Completed* (Limpieza del depósito completada) (figura 2B). El sistema está listo para la segunda etapa del ciclo de limpieza: limpieza del transductor.
- Verifique que el transductor esté conectado al conector del circuito de agua en el frontal.
- Llene el transductor pulsando el botón «Fill» (Llenar)  en la pantalla o en el controlador remoto del circuito de agua. Cierre la válvula una vez que el transductor esté lleno.
(**Consejo:** si se coloca el transductor en una posición inferior, el volumen necesario para llenar la interfaz del transductor será menor y se reducirán los tiempos de llenado y de drenaje en el procedimiento de limpieza del transductor).
- Pulse el botón «Start» (Iniciar)  en la pantalla (figura 3A) o en el controlador remoto del circuito de agua para iniciar el temporizador de limpieza del transductor.

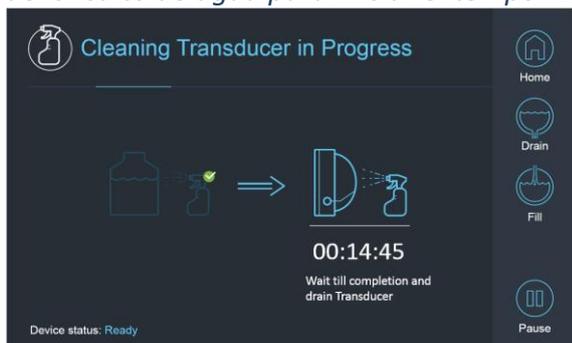


Fig. 3A: pantalla «Cleaning Transducer in Progress» (Limpieza del transductor en curso)



Fig. 3B: pantalla «Cleaning Transducer Complete» (Limpieza del transductor completa)

- Una vez finalizado el temporizador, se completa la limpieza del transductor (figura 3B).
- Ajuste la válvula de escape de aire.
- Drene el agua del transductor pulsando el botón *Drain* (Drenar)  en la pantalla o en el controlador remoto del circuito de agua.
- Deseche el agua del depósito de agua de acuerdo con las regulaciones locales o del centro.
- Deje el depósito abierto al aire (sin la tapa).
- Sustituya la membrana de la interfaz del soporte del fantoma con la cubierta protectora del transductor.
- Apague la estación de trabajo *Exablate®* si no hay más tratamientos programados en el día.

Manipulación de la membrana del paciente y del gel de simulación para el DQA



ADVERTENCIA:

El incumplimiento de las instrucciones de manipulación de la membrana del paciente y del fantoma de gel para el DQA puede provocar una reducción de la calidad de las imágenes, fugas de agua, contaminación cruzada, quemaduras, riesgo de electrocución y resultados del DQA falsos o poco fiables.

- Se recomienda usar equipo de protección personal (por ejemplo, guantes) al manipular los accesorios.
- Las membranas de paciente (con/sin bobina) y el fantoma del DQA están destinadas a un solo uso.
- Deseche la membrana y el fantoma de gel para el DQA y sus cajas de almacenamiento tras la finalización de un tratamiento (de acuerdo con los procedimientos locales o del centro).

Limpieza del transductor

- Antes y después de cada ciclo de limpieza, limpie la superficie interna del transductor con las toallitas de limpieza y desinfección. **No aplique fuerza sobre la superficie del transductor.**
Inspeccione visualmente la superficie del transductor en busca de suciedad o grietas.
- Después del tratamiento, coloque la cubierta protectora sobre la superficie del transductor.

Lista de verificación de la calibración TG

Nota: Aplicable **solamente** para unidades de RM de 3T GE que ejecutan DV26 o superior. Realice una vez por tratamiento (después del localizador en 3D) para mejorar la calidad de la imagen.


Una vez hecha la exploración, **duplique y edite el localizador en 3D** en la pantalla de la consola de RM.

Pulse el botón **GRx**  para que aparezca la **Graphic Rx toolbar** (Barra de herramientas Rx gráfica):




Asegúrese de que el localizador en 3D se muestre en la pantalla de RM como fondo de planificación.

Si no es así, pulse , seleccione la serie del localizador en 3D y pulse «OK ALL» (ACEPTAR TODO).

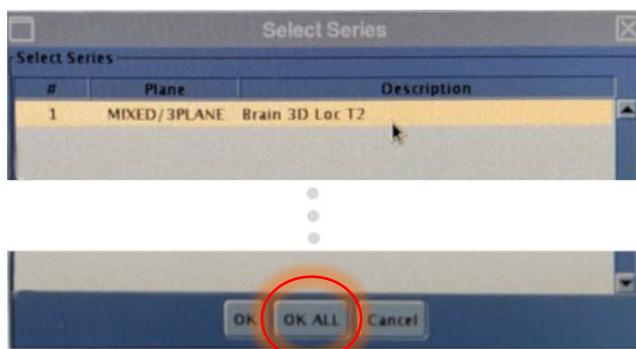

Pulse **Shim** (Ajuste) y haga clic en una de las ventanas de la imagen para mostrar la malla de volumen de ajuste local:

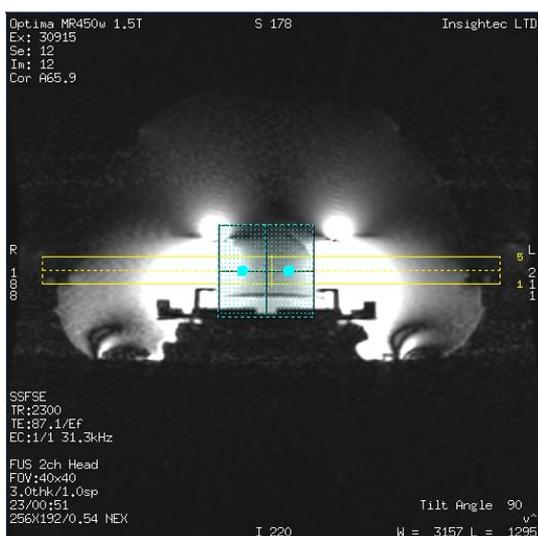

Ejemplo de volumen de ajuste local (en verde)




Menú Shim (Ajuste)

En el menú **Shim** (Ajuste), active **Localized TG** (TG localizado) (obligatorio).

Arrastre el volumen de ajuste (Shim Volume) de modo que quede centrado aproximadamente alrededor del área deseada.

Ajuste el tamaño del volumen en cada dirección entre 7 y 9. Asegúrese de que todo el volumen esté dentro del tejido cerebral.

 Habilitar «Symmetric Vol» (Volumen simétrico) permite un cambio más rápido del tamaño del volumen de ajuste.

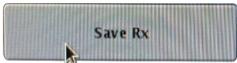Guarde la serie  y continúe con el flujo de tratamiento en la **estación de trabajo de FUS**.